

SMART-WELL - Guia rápido de configuração e programação

INSERINDO O LOTE

Na tela do menu principal, toque na CAVIDADE que deseja configurar.



Fig.1

Abrir a tela da CAVIDADE correspondente. Tecla em SETUP.



Fig.2

Abrir a tela do SETUP da cavidade selecionada - Ex. Cell 01



Fig.3

INSERIR O LOTE - Tecla em LOT e abrirá a tela de LOT para inserir os dados.



Fig.4

O "S" que está no número do lote é pré-programado e não necessita ser inserido. Apenas a parte numérica do número do lote precisa ser inserida

Selecione os números nos quadros e com as setas superiores, mude para o próximo número.

Tecla em ENTER para salvar e retornar a tela anterior Fig.3, para configurar o esterilizador.

IDENTIFICANDO O ESTERILIZADOR

Repita os procedimentos recomendados nas figuras 1 - 2 - 3 do primeiro quadro. Ou prossiga.



Fig.3

ESTERILIZADOR - Tecla em STER para identificar o esterilizador testado.

IDENTIFICANDO O OPERADOR



Fig.5

STER - O esterilizador pode ser identificado com 3 números ou letras.

Selecione os números nos quadros e com as setas superiores, mude para o próximo número.

Tecla em ENTER para salvar e retornar a tela anterior Fig.3, para configurar as iniciais do operador.

Repita os procedimentos recomendados nas figuras 1 - 2 - 3 do primeiro quadro. Ou prossiga do SETUP da cavidade.



Fig.3

IDENTIFICANDO: Tecla em INITIALS e abrirá a tela para inserir as iniciais do operador.



Fig.6

INITIALS - O operador pode ser identificado com 3 letras que podem ser as iniciais do nome.

Selecione as letras nos quadros e com as setas superiores, mude para a próxima letra.

Tecla em ENTER para salvar e retornar a tela anterior Fig.3, para configurar o CICLO de esterilização.

CONFIGURANDO O TIPO DE CICLO

Repita os procedimentos recomendados nas figuras 1 - 2 - 3 do primeiro quadro. Ou prossiga.



Fig.3

Tecla em CYCLE e aparecerá a tela abaixo para você selecionar:

Tipo de ciclo = TYPE

Temperatura: TEMP

Tempo de esterilização: TIME

BACK para voltar a tela anterior.



Fig.7

TIPO DE CICLO: Configure o tipo de ciclos do esterilizador tocando a tecla TYPE e selecione uma das opções abaixo:

Tipos de Ciclo	
Prevac	
Flash	
Express	
Gravity	

Para ajustar a temperatura de exposição do ciclo, toque a tecla TEMP até que a configuração desejada é obtida.

Temperaturas do Ciclo. (°C)	
121°	132°
134°	135°

TEMPO: Para ajustar o tempo de exposição durante o ciclo toque a tecla TIME. Usando o teclado, insira o tempo apropriado.

Toque a tecla ENTER para salvar a informação e retornar ao Menu de Setup do Ciclo.

As teclas de SETA movem o cursor para o espaço apropriado, se necessário.

Toque a tecla BACK para retornar para o Menu da cavidade.

COPIANDO AS INFORMAÇÕES PARA OUTRAS CAVIDADES

Se for incubar mais ampolas e as informações forem todas as mesmas, o operador pode copiar essas informações para as outras CAVIDADES.

1. Na tela do menu principal, toque a tecla que representa a cavidade a partir da qual a informação será copiada.
2. Na tela do menu da cavidade toque a tecla SETUP.
3. Toque a tecla MORE para avançar para a página 2 na tela do menu do Setup da cavidade.
4. Toque a tecla DEST para definir a cavidade ou as cavidades em que a repetição será adotada. O operador pode escolher entre copiar para a cavidade de controle uma cavidade individual ou TODAS (ALL) as cavidades.
5. Toque a tecla COPY para copiar a informação para a(s) cavidade(s) desejada(s).
6. Toque a tecla BACK para retornar para o Menu da cavidade.

VERIFICANDO AS CONFIGURAÇÕES NA TELA

Para verificar as configurações das cavidades individualmente, na tela principal fig1 selecione a cavidade que deseja verificar. A tela abaixo aparecerá, toque na tecla QUERY



Fig.2

A tela seguinte contém as informações inseridas durante a programação.

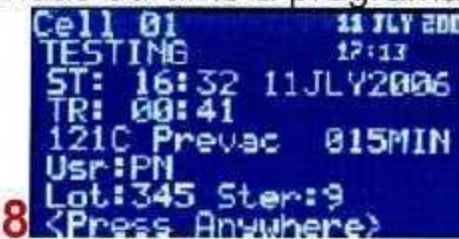


Fig.8

Tela de consulta(query).

Toque em qualquer área da tela para retornar ao Menu da cavidade.


IMPRIMINDO AS CONFIGURAÇÕES

Para verificar as configurações das cavidades individualmente, na tela principal Fig1 selecione a cavidade que deseja verificar. A tela abaixo aparecerá, toque na tecla PRINT.



Fig.2

A incubadora SMART-WELL envia um sinal para a impressora que vai imprimir as configurações da CAVIDADE selecionada.

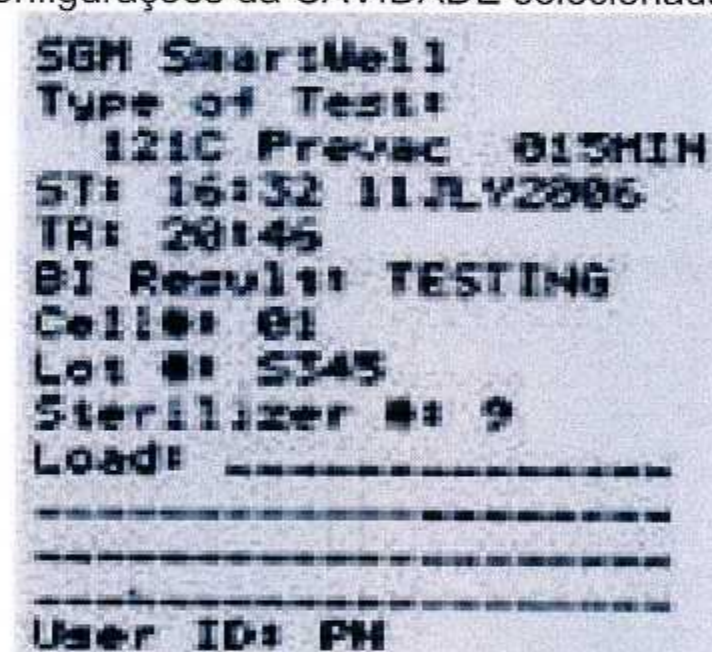

Versão Impressa (Printout)


IMPORTANTE: NÃO altere os dados da tecla SET-UP (fig.1) Depois de configurado o SET-UP não deve ser acionado novamente. Qualquer dúvida contate pelo telefone abaixo o seu distribuidor.

INCUBANDO O EZTEST SMART-READ

Leia as instruções e condições de incubação na bula do seu EZTest.

Ative o BI EZTest® Smart-Read posicionando-o na cavidade de quebra da incubadora Smart-Well (fig 7) puxando-a para frente até que a ampola interna de vidro quebre, liberando o meio de cultura para que este entre em contato com a tira de esporos.

Fig.9

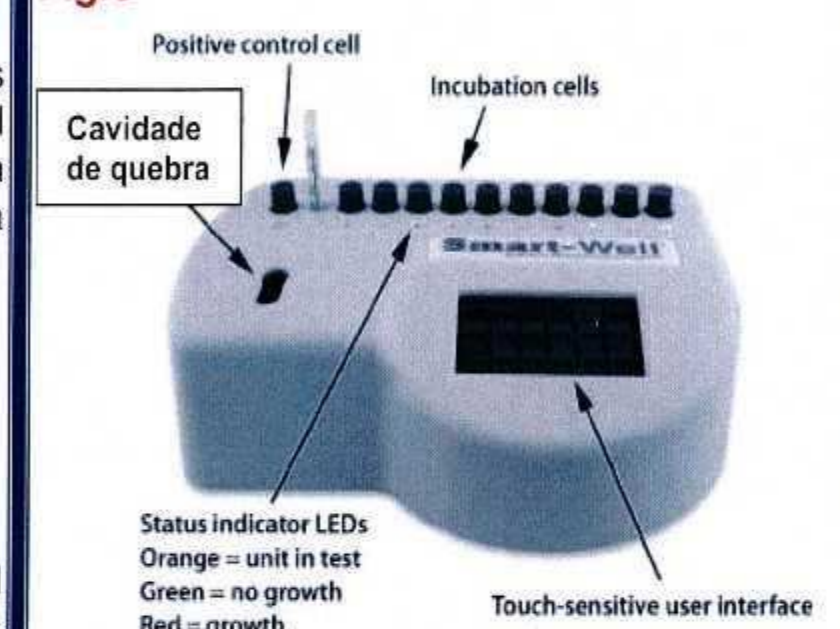

A CAVIDADE esquerda "C" utilize para incubação da ampola controle. As outras CAVIDADES de "1 a 10" para as ampolas que passaram pelo processo de esterilização. Após a ativação, posicione todos os outros indicadores biológicos (BIs) EZTest® Smart-Read nas cavidades de incubação de números de 1 a 10.

Aguarde o resultado.

ATENÇÃO: Para maior conveniência do usuário, as configurações não são zeradas após o fim do teste. As configurações usadas em cada cavidade serão mantidas ativas até que sejam alteradas.



Fig.10

Menu principal exibindo Positivo, Negativo e Testando (incubando).



OSTEOPATHY SOLUTION

Distribuidor São Paulo

Rua Borges Lagoa, 1080 - Conj 1002/1004
Vila Clementino - Cep: 04038-002 - São Paulo - SP
Tel.: 11 5081-2240 / Fax.: 11 5572-7503
E-mail: osteos@osteos.com.br