

Nome de produto: *Emulador Químico EQ7 MONITORE*

Tipo de produto: Emulador Químico

Código Número : EQ-7

Descrição: O *Emulador Químico EQ7 MONITORE* é um Emulador Químico tipo 6, projetado para uma resposta integrada a todos os parâmetros críticos de esterilização por vapor em autoclaves com pré-vácuo que operam a 134°C por 7 minutos ou a 121°C por 20 minutos de exposição direta. Proporciona uma confirmação visual das condições de esterilização ou não, no interior dos pacotes ou caixas, dentro da câmara do esterilizador.

Características de desempenho:

O *Emulador Químico EQ7* tem um círculo de tinta indicadora que muda de cor quanto exposto as condições de esterilização por vapor.

Mudança de cor: Púrpura para Verde. Obs. A tonalidade de verde varia de claro a escuro, de acordo com invólucro do material, como: caixa metálica, papel grau cirúrgico, vidro, plástico, ou outros.

Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:

7 minutos ou mais a 134°C (+/- 1°C) 20 minutos ou mais a 121°C (+/- 1°C)

Estabilidade do indicador: Antes ou depois da esterilização = Excelente


INSTRUÇÕES DE USO:

- Coloque uma tira do **Emulador MONITORE** em cada pacote ou caixa a esterilizar e processe conforme seu protocolo.
- Terminado o ciclo de esterilização, verifique se a cor indicativa mudou completamente de **PÚRPURA** para **VERDE**.
- Se o **Emulador MONITORE** evidenciar condições inadequadas de esterilização, reprocessar o material com novas tiras indicadoras.

Limitações ambientais:

Armazenamento: Antes da exposição, o *Emulador Químico MONITORE* deve ser armazenado em ambiente de temperatura entre 0° a 40° C e umidade normal (10 a 90%) na embalagem original. Após a esterilização, as tiras do *Emulador Químico EQ7 MONITORE* é estável e não requer nenhuma condição especial de armazenamento.

Características físicas:

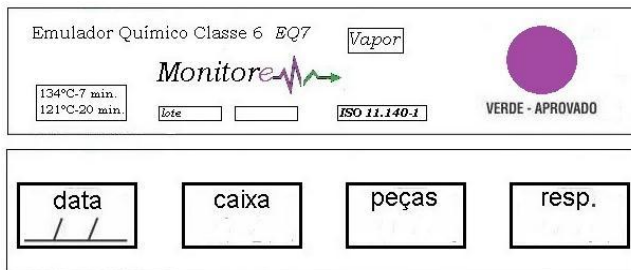

Dimensões: 10,7cm X 2cm

Quantidade / Caixa: 250 tiras

Validade: 3 anos da manufatura.

Classificações de padrões: ANSI/AAMI/ISO 11140-1, tipo 6

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 260 de 23/09/2002 – ANVISA.

Fabricante: 07.585.476/0001-80

Atendimento ao Consumidor: (11) 5081 -2240

E-mail: osteos@osteos.com.br

RESP.TÉCNICO: Dulce M. Z. Cavalcanti **CRF-SP:** 15359